



## Directives de prélèvement d'échantillons de lait pour l'analyse de *Staphylococcus aureus* génotype B

<b>Matériel</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Formulaire officiel de demande d'analyses EOLAB</li><li>• Eprouvettes stériles de 30 ml</li><li>• Matériel pour l'expédition EOLAB</li></ul> <p>Tout le matériel peut être demandé aux numéros: <b>091 811 17 85 / 091 811 17 17</b></p>
<b>Limitation d'analyse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il n'est pas possible d'effectuer l'analyse du colostrum. Il est possible d'analyser des échantillons de lait de bovins ayant vêlé <b>depuis 21 jours</b>.</li><li>• Il n'est pas possible d'effectuer l'analyse de lait des vaches sous thérapie antibiotique: Effectuer l'analyse au plus tôt après le double du temps d'attente de chaque antibiotique.</li><li>• Il n'est pas possible d'effectuer l'analyse des échantillons contenant du bronopol</li></ul>
<b>Processus</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Porter des gants jetables</li><li>• Après avoir nettoyé les <u>tétons</u>, prélever manuellement (sans collecteurs) <b>5-6 ml de lait par quartier</b> mammaire</li><li>• Éliminer <b>les premiers 2 ou 3 jets</b> de lait de chaque quartier</li><li>• Utiliser une seule éprouvette de <b>30 ml</b> pour les 4 quartiers du bovin.</li><li>• Les échantillons doivent parvenir au laboratoire au plus tard <b>24 h</b> après le prélèvement. Conserver les échantillons à <b>+4°C</b> jusqu'à leur expédition.</li><li>• <b>Attention</b>, la poste informe que pour garantir la livraison dans les 24 h, l'expédition doit être effectuée auprès du bureau de poste, avec le matériel pour l'expédition EOLAB, du lundi au jeudi avant 12 h. Certains bureaux de poste acceptent les paquets prioritaires jusqu'à 16h. Nous vous conseillons de contacter votre bureau postal de zone pour vérifier les horaires d'acceptation des paquets prioritaires.</li><li>• Ne pas envoyer les paquets le vendredi, car aucune livraison n'est effectuée le samedi au laboratoire.</li></ul>
<b>Contact</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter au <b>091 811 17 85 / 17</b></li></ul> <p>SERVIZIO DI MICROBIOLOGIA EOLAB Laboratorio di microbiologia veterinaria Via Mirasole 22 A 6500 Bellinzona</p>