



Direttive per il prelievo di campioni di latte per l'analisi di *Staphylococcus aureus* genotipo B

Materiale	<ul style="list-style-type: none">• Formulario di richiesta analisi ufficiale del laboratorio EOLAB.• Provette sterili da 30 ml.• Materiale per la spedizione EOLAB. <p>Tutto il materiale può essere richiesto al numero 091 811 17 85 oppure 091 811 17 17.</p>
Limitazione di analisi	<ul style="list-style-type: none">• Non è possibile effettuare l'analisi dal colostro. Possono essere analizzati campioni di latte di bovine che hanno partorito da almeno 21 giorni.• Non è possibile effettuare l'analisi dal latte di bovine sotto terapia antibiotica: eseguire l'analisi al più presto trascorso il doppio del tempo di attesa di ogni singolo antibiotico.• Non è possibile effettuare l'analisi da latte contenente Bronopol (sostanza conservante).
Procedura	<ul style="list-style-type: none">• Indossare guanti monouso.• Dopo un'accurata pulizia dei capezzoli prelevare manualmente (senza l'ausilio di collettori) 5-6 ml di latte per ogni quarto mammario.• scartare i primi 2-3 getti di latte di ciascun capezzolo.• Utilizzare una sola provetta da 30 ml per tutti i quattro quarti dell'animale.• I campioni devono arrivare in laboratorio entro 24 ore dal prelievo.• Conservare a +4°C i campioni di latte fino alla spedizione.• Attenzione: la posta informa che per garantire la consegna entro le 24h, la spedizione deve essere effettuata dagli uffici postali, con il materiale per la spedizione EOLAB, dal lunedì al giovedì, generalmente entro le ore 12.00. Alcuni uffici postali accettano i pacchi prioritari fino alle ore 16.00, pertanto vi invitiamo a contattare il vostro ufficio postale di zona per la conferma degli orari di accettazione dei pacchi prioritari.• Non è possibile spedire i pacchi il venerdì, poiché il laboratorio non riceve i pacchi nella giornata di sabato.
Contatto	<ul style="list-style-type: none">• In caso di dubbi o chiarimenti tecnici contattare il nostro reparto di veterinaria al numero 091 811 17 85 / 17 <p>SERVIZIO DI MICROBIOLOGIA EOLAB Laboratorio di microbiologia veterinaria Via Mirasole 22 A 6500 Bellinzona</p>